

CGM Anytime CT3

System Ciągłego Monitorowania Glikemii
w czasie rzeczywistym

Model : CT3

Skrócona Instrukcja Używania

Elementy systemu CGM Anytime CT3



Applikator z sensorem



Transmitter



Etui z ładowarką transmitera



Kabel USB typu C


1 Przygotowanie

Krok 1: Pobieranie aplikacji na smartfon

- Włączyć Bluetooth w telefonie komórkowym.
- Zeskanować kod QR znajdujący się na opakowaniu transmitera, aby pobrać lub zaktualizować aplikację.
- Postępować zgodnie ze wskazówkami, aby się zalogować.



1 Włączanie Bluetooth

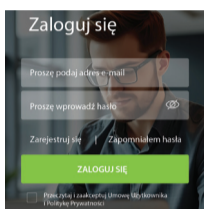

2 Logowanie

Krok 2: Ładowanie transmitera

- Umieścić transmitter w etui z ładowarką transmitera. Zacznie migać białe światło diody (wskaźnik naładowania) co oznacza, że urządzenie jest w procesie ładowania.
- **Poczekać, aż dioda zmieni kolor na niebieski, co oznacza pełne naładowanie.** Następnie należy wyjąć transmitter z etui.



Odłączyć transmitter po pełnym naładowaniu


Wskaźnik naładowania transmitera

Migające białe światło diody: trwa ładowanie
Niebieskie światło diody: pełne naładowanie

2 Połączenie systemu z aplikacją na smartfonie

Krok 1: Połączenie z transmitterem


- Na ekranie „Połączenie transmitera” w aplikacji wybrać numer SN odpowiadający transmitterowi, aby nawiązać połączenie.

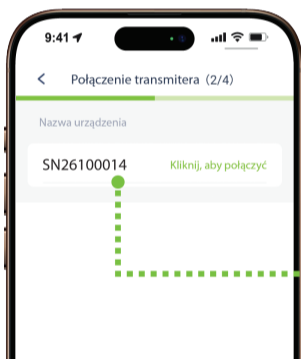

SNxxxxxxxx

Krok 2: Połączenie z sensorem

- W aplikacji zeskanować kod QR znajdujący się na plastikowej folii zabezpieczającej sensor i wejść w tryb rozgrzewania. Czas rozgrzewania systemu: 1h.

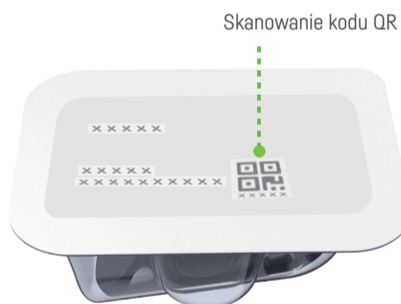


Skanowanie kodu QR

Krok 1:

SUGESTIA: Wybrać brzuch lub tylną część ramienia jako miejsce umieszczenia sensora.

W przypadku wyboru miejsca wprowadzenia sensora na brzuchu umieścić go w odległości min. 5 cm na ukos powyżej pępka oraz co najmniej 5 cm od zestawu infuzyjnego pompy insulinowej lub miejsca wstrzyknięcia insuliny, w zaznaczonym obszarze na rysunku, unikając okolicy noszenia paska, blizn i zęb. W przypadku wyboru miejsca wprowadzenia sensora na ramieniu, wybrać jego tylną część.

- Zdezynfekować miejsce za pomocą chusteczki nasączonej alkoholem i pozostawić do wyschnięcia przed wykonaniem kolejnego kroku.

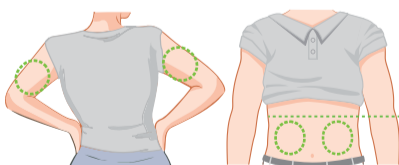


Poniżej zęb

Krok 2:

Nie odblokowywać aplikatora przed przyłożeniem do skóry

- Delikatnie chwycić za pomarańczowe elementy folii ochronnej i odkleić jej dwie części.

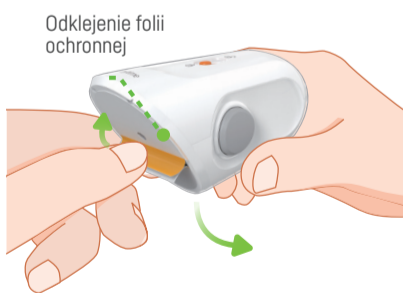

Odklejenie folii ochronnej

Krok 3:

Nie odblokowywać aplikatora przed przyłożeniem do skóry


- Umieścić sensor precyzyjnie w wybranym miejscu jego wprowadzenia.



Poziome przyłożenie

Krok 4:

- Przesunąć pomarańczową blokadę na aplikatorze do pozycji odblokowania [otwarta kłódka].

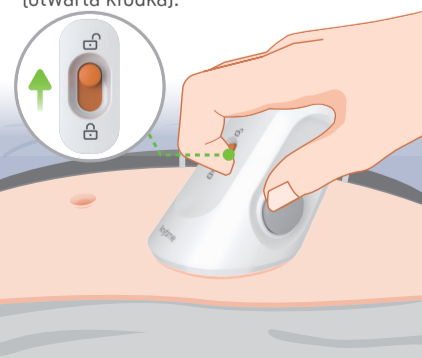

Krok 5:

- Jednocześnie nacisnąć przyciski zwalnające po obu stronach aplikatora, aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia".



Krok 6:

- Powoli odsunąć aplikator od sensora aż do odłączenia, aby zakończyć wprowadzenie sensora.



3 Wprowadzenie sensora

Krok 1: ! Istotne kroki

- Umieścić transmitter na sensorze, w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.



Prawidłowy sposób umieszczenia (wsunięcie)




Nieprawidłowy sposób umieszczenia (nałożenie i zapięcie)


Krok 2:

- Precyzyjnie złączyć transmitter i sensor, jak pokazano na rysunku poniżej, aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia".


! Uwaga: Należy poruszyć transmitterem w przeciwnym kierunku, aby upewnić się, że jest zablokowany.

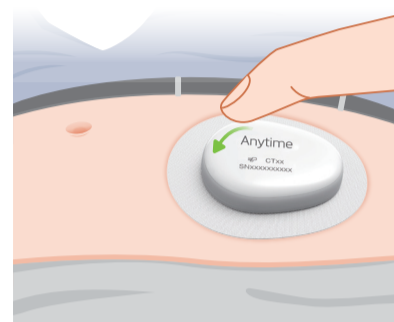

- Po zakończeniu rozgrzewania systemu, aplikacja zaczyna wyświetlać wartości glikemii.

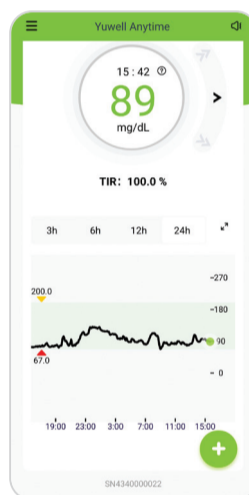

- Powoli odkleić plaster i **zjąć sensor i transmitter razem**, z miejsca umieszczenia.
- Po zdjęciu z ciała nacisnąć zatrzask w dół i przesunąć transmitter, aby go odłączyć.
- Zutilizować sensor zgodnie z przepisami lokalnego prawa dotyczącymi odpadów medycznych.

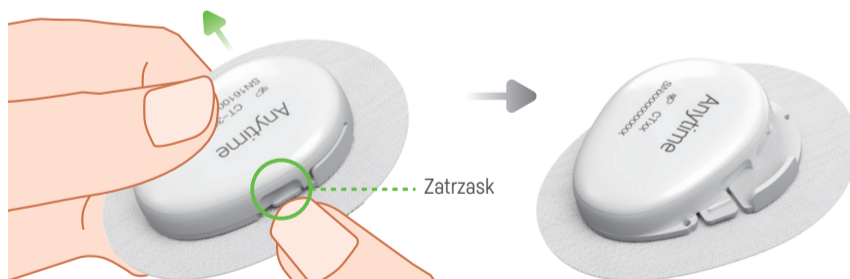

! Należy uważać, aby omyłkowo nie wyrzucić transmitera.

! Transmitter należy natychmiast naładować.

CGM Anytime CT3

INFOLINIA GENEXO:
 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00
 • Dla telefonów stacjonarnych: **801 808 818**
 (całkowity koszt połączenia w cenie 1 impulsu wg taryfy operatora)
 • Dla telefonów komórkowych: **512 805 756**
 (koszt połączenia ponosi dzwoniący zgodnie z taryfą operatora)

Zhejiang POCTech Co., Ltd.
 No. 1633 Hongfeng Road, Budynek 11 i 12,
 Huzhou City 313000, Zhejiang, Chiny

EC REP Prolinx GmbH
 Brehmstr. 56, 40239 Düsseldorf, Niemcy

Genexo Sp. z o.o.
 ul. Gen. Zajęczka 26,
 01-510 Warszawa, Polska
 tel.: (+48 22) 839 11 99
www.genexo.pl
www.cgmggenexo.pl

Numer dokumentu: A4-CGM14-010
 Numer wersji: V20230610 rev1
 Przygotowano: 06/10/2023
 Rev. 09/24-PL